

Gebrauchsanleitung **fytofontana VIROSTOP Nasenspray**



Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den Fall eines weiteren Gebrauchs auf.

Virusinfektionen gehören zu den häufigsten Infektionserkrankungen der Atemwege mit typischen Symptomen. Sie beginnen plötzlich, deshalb muss man schnell und rechtzeitig eingreifen. Diese Erkrankungen (einschließlich Schnupfen) werden von Viren ausgelöst, die bei einer Infektion über die Schleimhäute in den Organismus übertragen, wo sie sich schnell vermehren. Dank der reichlich enthaltenen Polyphenole bildet der Extrakt aus *Cistus creticus* einen Schutzfilm auf der Nasenschleimhaut. Diese Schutzbarriere dient zur physischen (mechanischen) Abwehr gegen Viren, verhindert ihr Eindringen und eine weitere Vermehrung. Das Medizinprodukt wirkt auf der Schleimhaut der oberen Atemwege – konkret auf der Mundschleimhaut bei Mundspray/Pastillen und auf der Nasenschleimhaut bei Nasenspray. Weitere Inhaltsstoffe – Zitrus-Bioflavonoide, Purpursonnenhut, Echter Salbei und Barbados-Kirsche (Acerola) verstärken die neutralisierende Wirkung gegen Viren.

Zusammensetzung: Kretische Zistrose – Extrakt (1,90 g), Purpursonnenhut – Extrakt (3,06 g), Echter Salbei – Extrakt (0,88 g), Zitrus-Bioflavonoid-Komplex (0,05 g), Acerola-Extrakt (0,02 g), Hyaluronsäure, Minze-Aroma, Echte Aloe – Extrakt, Wasser, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Bestimmungszweck

Fytofontana VIROSTOP ist als Schutzbarriere gegen Viren bestimmt, die eine Entzündung der oberen Atemwege verursachen, indem es auf die Schleimhaut der oberen Atemwege aufgetragen wird.

Indikation

Schleimhautrötung bei Entzündung der oberen Atemwege.

Hauptwirkungsmechanismus

Der Hauptwirkungsmechanismus des Medizinprodukts fytofontana VIROSTOP Nasenspray besteht darin, dass es die Schleimhäute der Nasenhöhle mit einem Schutzfilm bedeckt und so ein Eindringen der Viren in den Körper verhindert.

Kontraindikationen

Allergien auf einen Bestandteil des Medizinprodukts (die im Abschnitt Zusammensetzung angegeben sind).

Nebenwirkungen

Nach der Anwendung von fytofontana VIROSTOP Nasenspray kann es vorübergehend zu einer leichten Reizung der Schleimhaut kommen. Diese Gefühle sind vorübergehend und natürlich.

Vorgesehene Benutzer/Patienten

Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP Nasenspray ist für Erwachsene und Kinder ab **3 Jahren** bestimmt.

Prophylaktische Maßnahmen und Hinweise

- ⚠ Nicht bei Kindern unter 3 Jahren verwenden. Ältere Kinder sollten das Präparat nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- ⚠ Schwangeren und stillenden Frauen wird hinsichtlich des Gebrauchs die Rücksprache mit einem Facharzt empfohlen.
- ⚠ Wenn die Symptome anhalten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
- ⚠ Nach chirurgischen Eingriffen im Nasen- und Mundbereich oder bei einer beschädigten Schleimhaut der oberen Atemwege wird von der Verwendung des Präparats abgeraten.
- ⚠ Das Präparat ist für den Gebrauch durch eine Person bestimmt – Risiko einer Infektionsübertragung.
- ⚠ Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Eventuelle feine Ablagerungen sind auf die pflanzlichen Inhaltsstoffe zurückzuführen, die das Präparat enthält, und beeinflussen in keiner Weise die Produktqualität. Beim Umgang mit dem Spray muss ein direktes Eindringen des Präparats in die Augen vermieden werden. Nach Augenkontakt die Augen mit fließendem Wasser ausspülen.

Dosierung

Vorbeugend: 3 – 4× täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch, bei Kindern ab 3 Jahren wird 2× täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch verabreicht. Auch für die vorbeugende Anwendung geeignet. Wenn Sie einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, können Sie das Spray auch mehrmals täglich anwenden.

In einem akuten Zustand: 4 – 5× täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch, bei Kindern ab 3 Jahren wird 3× täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch verabreicht.

Sehr wichtig ist die Anwendung abends vor dem Schlafen.

Der Hauptnutzen für den Patienten besteht im Einfluss auf die öffentliche Gesundheit durch die Verwendung von VIROSTOP, denn

- Polyphenole fördern die lokalen Abwehrkräfte der oberen Atemwege im Frühstadium der Infektion.
- Eine Verbesserung der Lebensqualität durch die Verkürzung der Symptome einer Infektion der oberen Atemwege.
- Die prophylaktische Anwendung von VIROSTOP in Zeiten eines vermehrten Auftretens von Infektionen im Kollektiv verringert die Anfälligkeit für Infektionen der oberen Atemwege.

Anwendung des Sprays

Die Sprayform ermöglicht eine einfache und gleichmäßige Anwendung auf der Nasenschleimhaut.

- Vor dem Gebrauch schütteln.
- Schutzkappe vom Sprühkopf entfernen.
- Sprühkopf in das Nasenloch einführen und durch ein Drücken des Sprühkopfs dosieren.
- Nach jedem Gebrauch den Sprühkopf reinigen und die Schutzkappe aufsetzen.

Packungsinhalt: Flasche mit Sprühkopf und Applikator, Füllmenge 20 ml


Haltbarkeitsdauer des Medizinprodukts

Die Haltbarkeitsdauer des Medizinprodukts wird durch das Verfallsdatum auf der Produktverpackung bestimmt – 36 Monate ab dem Herstellungsdatum.

Zubehör oder kompatible Medizinprodukte

Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP hat kein Zubehör und auch keine kompatiblen Medizinprodukte.

Lagerung

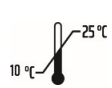

Angaben sind auf der Verpackung angegeben

Entsorgung: Das unverbrauchte Präparat in die Apotheke zurückbringen. Sauberes Verpackungsmaterial im entsprechenden Sammelbehälter entsorgen.



Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince 404, Slowakische Republik nach einer Lizenz der Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Schweiz

www.virostop.info

www.fytofontana.com



Weitere Informationen

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls, der durch das Produkt verursacht wurde, sollte der Anwender diesen Vorfall dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem der Anwender ansässig ist.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Gebrauchsanleitung beachten		Hersteller
	Verwendbar bis		Chargennummer
	Temperaturbegrenzung		Vor Sonnenlicht schützen
	CE-Kennzeichnung		Medizinprodukt
	Referenznummer		Einmalige Produktkennung
	Vorsicht		

Ausstellungsdatum: 23.01.2026



10036DE-P-2